

Schnelldesinfektionsmittel

DESCOSEPT AF

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- Aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel
- Umfassende Virenwirksamkeit inklusive Noroviren (MNV)
- Mit frischem Duft



Produktbeschreibung

DESCOSEPT AF ist ein gebrauchsfertiges, aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol.

DESCOSEPT AF hat einen angenehmen, frischen Duft. Das Produkt verfügt über eine umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren inkl. Noro-Viren sowie über hervorragende Reinigungseigenschaften.

DESCOSEPT AF ist geeignet zur Flächendesinfektion für Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

DESCOSEPT AF ist zum Beispiel geeignet zur Flächendesinfektion in folgenden Bereichen:

- patientennahen Flächen wie Nachttische, Betten, Patientenliegen und Behandlungstühle
- Transportmittel zum Krankentransport
- allgemeines alkoholbeständiges Mobiliar wie Verbandswagen, Badewannen, Toilettensitze und Transportkörbe
- alkoholbeständige Medizinprodukte wie Fieberthermometer, Blutdruckmessgeräte und Venenstauschläuche

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min	5 min	30 min
Bakterien und Hefen							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
	VAH / EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•			
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•			
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung			•		
Viren							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
	EN 14348	niedrige Belastung	•				
		hohe Belastung	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				•	
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV			•			
Ergänzende Prüfergebnisse							
bakterizid	EN 1040		•				
	EN 1276	niedrige Belastung		•			
	EN 13727	niedrige Belastung	•				
		hohe Belastung		•			
EN 13697	niedrige Belastung		•				
levurozid (Candida albicans)	EN 1275		•				
	EN 1650	niedrige Belastung		•			
	EN 13624	niedrige Belastung		•			
		hohe Belastung		•			
EN 13697	niedrige Belastung		•				
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	DGHM	niedrige Belastung					•

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



DESCOCEPT AF

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. **DESCOCEPT AF** kann als Wischdesinfektion oder Spray verwendet werden. Flächenwischdesinfektion (empfohlene Art der Anwendung): Eine ausreichende Menge **DESCOCEPT AF** auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Flächen abwischen. Die Flächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein. Eine Sprühanwendung ist nur für schwer zugängliche Flächen zulässig.

Einsatz in Vliestuchspendersystemen:
DESCOCEPT AF eignet sich insbesondere zur Verwendung in den Vliestuchspendersystemen one system PLUS und basic mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen oder in **DESCO/ECO WIPES** -Vliestuchspendersystemen mit einer Standzeit von bis zu 28 Tagen.

Materialverträglichkeit

DESCOCEPT AF ist freigegeben für die Desinfektion der Materialien folgender Hersteller:
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach
- Bergé & Co. GmbH, Versmold

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
42 g Ethanol,
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
enthält Duftstoffe

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT AF	Keulenflasche	500 ml	10	00-311-005	00792277
	Flasche	1 L	10	00-311-010	00792283
	Kanister	5 L	3	00-311-050	00792308
	Kanister	10 L	1	00-311-100	00792314
Dosierhilfen	Schaumsprühkopf	1 L	1	00-912-010	-
	Sprühkopf (Keulenflasche)	500 ml	1	00-905-005	-
	Sprühkopf (Spenderflasche)	1 L	1	00-905-010	-
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

