

# Untersuchungshandschuhe unsteril

## Anleitung zum An- und Ausziehen



<b>Indikationen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsterile Untersuchungshandschuhe sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und können für medizinische Zwecke zum Schutz gegen potenziell infektiöse Materialien und andere Kontaminationen verwendet werden.</li> <li>2. Unsterile Untersuchungshandschuhe bieten Schutz beim Umgang mit Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien (nur Schutzhandschuhe gemäß EN 420, EN 374).</li> </ol>
<b>Wechselintervall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bei sichtbaren Perforationen;</li> <li>➤ bei Kontamination mit Blut, Sekreten oder Exkreten;</li> <li>➤ nach jeder Untersuchung;</li> <li>➤ nach Beendigung der jeweiligen Anwendung.</li> </ul>
<b>Anleitung zum Anziehen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen Sie vor dem Anziehen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion durch.</li> <li>2. Entnehmen Sie der Spenderbox zunächst einen Handschuh.</li> <li>3. Fassen Sie den Handschuh am oberen Rand der Stulpe an.</li> <li>4. Halten Sie den Handschuh am oberen Rand der Stulpe fest und ziehen Sie ihn in die richtige Passform. Achten Sie darauf, den Handschuh nicht zu überdehnen, um dadurch ein mögliches Einreißen zu vermeiden.</li> <li>5. Entnehmen Sie der Spenderbox den zweiten Handschuh.</li> <li>6. Ziehen Sie den zweiten Handschuh über und vermeiden Sie dabei die Berührung des Unterarms mit der bereits behandschuhten Hand, indem Sie die Finger der behandschuhten Hand über die Außenseite unter den Stulpenrand des zweiten Handschuhs schieben.</li> <li>7. Prüfen Sie vor Beginn der Nutzung den korrekten Sitz der Handschuhe und korrigieren Sie diesen bei Bedarf ohne freiliegende Hautstellen zu berühren. Überprüfen Sie die Handschuhe auf sichtbare Schäden.</li> </ol>

<p><b>Anleitung zum Ausziehen</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken sie den ersten Handschuh auf der Höhe des Handgelenks zusammen ohne dabei die Haut des Unterarms zu berühren. Ziehen Sie ihn dann von der Hand weg und kehren ihn von innen nach außen.</li> <li>2. Halten Sie den entfernten ersten Handschuh in der noch behandschuhten zweiten Hand und bringen Sie die Finger der nun unbehandschuhten Hand zwischen den noch anliegenden Handschuh und das Handgelenk. Entfernen Sie den zweiten Handschuh indem Sie ihn die Hand hinunterschieben und dabei auch von innen nach außen kehren. Dabei wird der erste Handschuh mit eingerollt.</li> <li>3. Entsorgen sie das entstandene „Handschuhbällchen“ (Innenseite der Handschuhe ist jetzt außen) direkt in einen bereitstehenden Abfallbehälter.</li> <li>4. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch.</li> </ol>
<p><b>Empfehlungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Das Tragen künstlicher oder lackierter Fingernägel, Ringe und jeglichem Schmuck an Händen und Unterarmen sollte unterbleiben.</li> <li>➤ Die Hände müssen vor dem Anziehen der Handschuhe sauber und vollständig trocken sein.</li> <li>➤ Zur Verbesserung des Tragekomforts und des Tastempfindens sowie zur Vermeidung von Überdehnung und möglichem Reißen des Handschuhs ist im Vorfeld die richtige Handschuhgröße auszuwählen..</li> </ul>
<p><b>Warnhinweis</b></p>	<p><b>Das Tragen von medizinischen Untersuchungshandschuhen und Schutzhandschuhen ersetzt grundsätzlich nicht die Händedesinfektion.</b></p>